

*GENTILE CLIENTE,*

*LA RINGRAZIAMO DELL'ACQUISTO DEL NOSTRO TEST DEL DNA.*

**IL SUO CODICE CLIENTE È \_\_\_\_\_**

Prima di iniziare la procedura di prelievo, La preghiamo di prendere visione delle informazioni sulla finalità del test, sulle relative modalità di esecuzione e risultati ottenibili, consultando la documentazione allegata, e **provvedere alla compilazione ed alla firma dei moduli autorizzativi per l'espletamento dell'esame** che troverà nel documento dedicato alla modulistica.

**Tali moduli correttamente firmati dovranno essere spediti al laboratorio utilizzando la busta pre-indirizzata contenuta nel Kit.**

### **Kit di prelievo**

Per l'esame da Lei richiesto dovrà utilizzare il nostro Kit, mediante il quale potrà effettuare i prelievi necessari per il test e successivamente inviare il tutto al Centro Analisi.

Per effettuare i prelievi è sufficiente seguire le istruzioni descritte nel foglio illustrativo presente all'interno del Kit.

Il Kit per l'esecuzione del DNA profiling su tracce biologiche è stato realizzato per dare la possibilità di eseguire il prelievo dei campioni biologici necessari per l'esecuzione del test direttamente alle parti, in completo anonimato, nel rispetto della privacy dei pazienti, evitando così la necessità della loro presenza in laboratorio ed inoltre stress ed ansie.

Il kit è di facile uso ed è costituito dai tamponi salivari (*cotton-fioc allungati*) mediante i quali si potrà prelevare un campione di cellule epiteliali della mucosa buccale, effettuando un'azione di brushing (*sfregamento*) introducendo lo spazzolino all'interno della bocca.

### **Modulistica**

All'interno di questo Kit di prelievo troverà il modulo autorizzativo per l'espletamento dell'esame, che dovrà essere debitamente compilato, firmato nelle parti indicate ed inviato al laboratorio insieme al Kit contenente il DNA da analizzare. Si ricorda che **se il kit verrà inviato senza i suddetti moduli, correttamente firmati, il Laboratorio non potrà procedere con l'analisi dei campioni ricevuti.**

## **Spedizione del Kit**

Una volta prelevato il DNA inserite le provette e i moduli nella busta pre-indirizzata contenuta all'interno del Kit.

**Contattaci tramite mail ad [info@dnaexpress.it](mailto:info@dnaexpress.it) ed insieme fisseremo la data di ritiro dei campioni col nostro corriere.**

## **Finalità del test**

Il Test mira a fornire al cliente un quadro generale sulla sua predisposizione ad alcune malattie genetiche, permettendo allo stesso di adottare per tempo le giuste contromisure, come analisi più approfondite o adottando uno stile di vita più salutare.

DNA Express raccomanda di eseguire questo tipo di Test consultando prima e dopo il risultato un medico di fiducia che possa aiutarvi nella corretta interpretazione del referto.

## **Tempi di refertazione**

L'esito dei nostri test è normalmente ottenibile in 21 giorni lavorativi dall'arrivo dei campioni al nostro Centro.

## **Ricezione dei risultati**

L'esito dell'esame sarà inviato mediante e-mail o WhatsApp.

## **Ripetizione del Prelievo di Saliva**

Nel caso in cui il laboratorio valuterà che i campioni arrivati in laboratorio contengano poca saliva o comunque siano **inutilizzabili per eseguire le analisi**, verrà richiesto un nuovo prelievo.

DNA Express fornirà gratuitamente un nuovo kit ma dovranno essere saldati i costi di ripetizione analisi (50€) e spedizione (25€) tramite bonifico bancario o in contrassegno al corriere di spedizione con un costo extra di 10€ (*Totale pagamento in contrassegno delle spese di ripetizione 85€*).

## La sicurezza dei Test del DNA

Il Test ha una percentuale di affidabilità del 99,99999998% (*non è possibile raggiungere il 100% per soli motivi matematici*). Per raggiungere la massima attendibilità dei risultati, il Centro Analisi rispetta scrupolosamente gli standard di qualità suggeriti nelle linee-guida e nelle direttive che a vari livelli vengono emanate dalle comunità scientifiche internazionali e nazionali.

L'analisi è completamente automatizzata, e viene eseguita mediante un sequenziatore automatico a tecnologia fluorescente, che rappresenta quanto di meglio offre al momento la moderna tecnologia. Il tipo di strumentazione utilizzata dal Centro permette di effettuare un tipo di indagine ad alto livello qualitativo, con tempi di risposta estremamente rapidi, ed a basso costo.

**IMPORTANTE: Il test non può essere effettuato costringendo gli interessati ad effettuare il prelievo contro la propria volontà, o effettuando i prelievi su minori senza avere la potestà genitoriale sul minore medesimo (art. 316 c.c.), in quanto verrebbero violate delle norme di legge. Il cliente si assume ogni responsabilità nel caso gli stessi siano stati ottenuti in maniera illegale.**

**FIRMA** (il richiedente il test)

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_