

# ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEI CAMPIONI

**Prima di iniziare la procedura di prelievo, si prega di leggere tutte le informazioni presenti in queste pagine con attenzione.**

**Assicurarsi che tutte le sezioni pertinenti al modulo di raccolta dei campioni e le buste siano compilate in stampatello con le firme di ciascun partecipante.**



## Contenuto:

incluso nel kit trova i tamponi buccali dentro le buste di raccolta.

**Si prega di utilizzare due coppie di tamponi a persona in fase di test.**


## Prelievo del DNA con Tampone Salivare:

- Si raccomanda di **non mangiare bere o fumare per almeno due ore prima** che il campione orale sia prelevato.
- È importante **raccogliere un campione alla volta**, utilizzando un set di tamponi e la busta corrispondente alla persona.
- Completare le informazioni richieste sia sulla busta contenente i tamponi che sul modulo di raccolta del campione (*completo di firme per il consenso*).
- Aprire la confezione di carta e rimuovere i tamponi. Fare attenzione a maneggiare i tamponi solo dal lato non-cotone. **NON toccare l'estremità di cotone con le mani o le dita, in nessuna circostanza.**
- Raccogliere le cellule della guancia **rotolando la punta dei tamponi all'interno della guancia destra** (30 volte o per circa un minuto). Ci si assicuri di strofinare il tampone all'interno dell'intera superficie della guancia. Questa azione dovrebbe essere indolore, non aggressiva e non dovrebbe dare fastidio. Ripetere la procedura per lo stesso individuo con il secondo tampone.

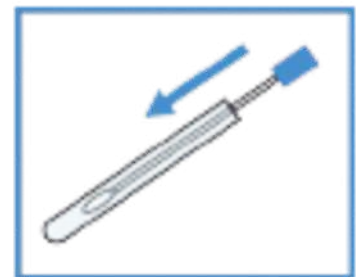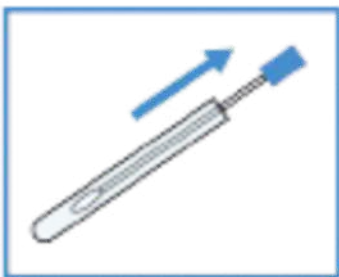

- Ripetere poi la stessa procedura per lo stesso individuo **usando la seconda coppia di tamponi all'interno della guancia sinistra.** **Occorre fornire quattro tamponi a persona.**

- **Lasciare i tamponi asciugare per un'ora prima di metterli nella corrispondente busta, facendo sempre attenzione a non toccare l'estremità di cotone con le dita o contro qualsiasi superficie. NON** posizionare i tamponi all'interno del pacchetto originale in cui sono stati ricevuti. Inserirli direttamente nella busta. **(Suggerimento: È possibile posizionare i tamponi in un bicchiere pulito con la punta di cotone rivolta verso l'alto per farla asciugare.)**

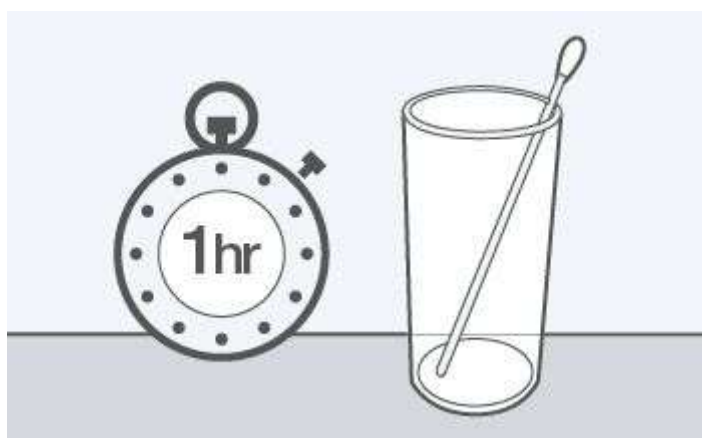

- **Ripetere la procedura per ogni singola persona testata utilizzando un diverso set di tamponi e la busta assegnata ad ogni persona.**

Come inviare i campioni:

**inserite i vostri campioni ed i moduli firmati nella busta pre-indirizzata fornita.** Contattateci per email ([info@dnaexpress.it](mailto:info@dnaexpress.it)) per attivare il ritiro tramite corriere di spedizione.

Consenso:

È importante che ogni persona che sottometta i tamponi buccali per il test dia il consenso **compilando i propri dati personali e la firma sul modulo di raccolta del campione.** I figli sotto l'età del consenso necessario avranno bisogno di una firma di un genitore o del tutore legale. In caso contrario, non sarà possibile eseguire il test.