

Istruzioni per la raccolta dei campioni per la Paternità Prenatale

(Campioni buccali del presunto padre)

Si prega di assicurarsi di leggere attentamente le istruzioni. La mancata corretta osservanza di queste istruzioni potrebbe influire sulla validità del campione o del risultato.

Prima di iniziare

1. Verificare che il paziente abbia letto le informazioni sul consenso e che abbia compilato e firmato il modulo di registrazione, ove applicabile
2. Verificare che il cliente abbia compilato tutti i dettagli richiesti sul proprio modulo
3. **Si raccomanda al paziente di non mangiare, bere o fumare per almeno un'ora prima che venga prelevato un campione buccale.**
4. **È importante raccogliere un campione alla volta. Richiediamo 2x tamponi per presunto padre.**

Raccogli i campioni

1. Aprire la confezione e rimuovere i tamponi. Fare attenzione a maneggiare i tamponi solo all'estremità non in cotone. **NON toccare mai il cotone con le mani o le dita in qualsiasi momento.**
2. Raccogliere le cellule delle guance facendo rotolare con decisione la punta del tampone di raccolta del campione all'interno della guancia destra (20-30 volte ciascuna o per circa 30 secondi o 1 minuto per tampone). Assicurarsi di spostare il tampone su tutta la superficie interna della guancia. Questa azione dovrebbe essere ferma ma non aggressiva e non dovrebbe essere scomoda. Ricorda che sono le cellule della pelle dentro la bocca di cui abbiamo bisogno, **non solo la saliva.**
3. **Ripetere questa procedura per lo stesso individuo fino a quando non sono stati utilizzati entrambi i singoli tamponi.**
4. **Lasciare asciugare i tamponi per 30 minuti/1 ora prima di rimetterli nelle loro provette, assicurandosi sempre di non toccare l'estremità in cotone con le dita o contro qualsiasi superficie.** (Suggerimento: è possibile posizionare i tamponi in un bicchiere pulito con il lato in cotone **rivolto verso l'alto**).

Etichettare & Impacchettare i campioni

1. **Completare i dettagli del paziente all'esterno delle provette contenenti i tamponi buccali e rimetterli nella busta Biohazard fornita.**
2. Mettere la busta biohazard contenente i tamponi all'interno della scatola (con i campioni di sangue della madre, dove applicabile)
3. Mettere la scatola contenente i campioni e tutti i documenti / moduli pertinenti all'interno della busta prepagata fornita.
4. **Non refrigerare, centrifugare o congelare i campioni.**

Rinvio del campione

Si prega di consultare il foglio di istruzioni "Rinvio del campione" all'interno del kit per le istruzioni su come rinviarci i campioni per il test.

Istruzione per la raccolta dei campioni (Paternita' prenatale)

Si prega di assicurarsi di leggere attentamente le istruzioni. La mancata corretta osservanza di queste istruzioni potrebbe influire sulla validità del campione o del risultato.

Controlla i moduli

1. Verificare che i pazienti abbiano letto le informazioni sul consenso e abbiano compilato e firmato i moduli di registrazione, laddove applicabile
2. Verificare che l'età gestazionale sia registrata e che sia perlomeno di 8 settimane alla data di raccolta.
3. Verificare che il cliente abbia compilato tutti i dettagli richiesti sul modulo.
4. Non è necessario che i clienti digiunino prima del prelievo di sangue richiesto.

Raccogli i campioni

1. Per la madre, prelevare 7-10ml di sangue nella provetta Streck fornita. **Un minimo di 7ml deve essere raccolto.**
2. **Immediatamente mescolare la provetta gentilmente invertendola parecchie volte:**



3. Completare i dettagli del paziente sulla/e provetta/e con nome e cognome e data di nascita nel formato **GG/MM/AAAA**. Registrare la data del prelievo del sangue e le iniziali sui moduli di raccolta del campione.
4. Tutti i campioni di sangue devono essere raccolti da una persona qualificata.

Impacchetta i campioni

1. Rinviare la/e provetta/e di sangue utilizzando le buste assorbenti ed il sacchetto con le bolle presenti nel kit. Posizionare la/e provetta/e protetta/e nella busta Biohazard corrispondente e sigillare.
2. Posizionare la busta Biohazard (così sigillata) contenente i campioni all'interno della confezione / scatola originale.
3. Mettere la scatola contenente i campioni e tutti i documenti / moduli pertinenti nella busta di risposta pagata fornita.
4. **Non refrigerare, centrifugare o congelare i campioni.**

Modulo del consenso

Si prega di consultare il **foglio di istruzioni "Rinvio del campione"** all'interno del kit per le istruzioni su come rinviarci i campioni per il test.