

## Istruzioni per il Prelievo di DNA nel Test della Calvizie:

Il kit che verrà spedito al vostro domicilio contiene una provetta trasparente con avvitato un imbuto, un cappuccio per richiudere dopo il prelievo e i moduli da compilare a mano dal cliente ed una busta pre-indirizzata per la spedizione al laboratorio.



### Procedimento:



1. **Evitare di mangiare, fumare, lavarsi i denti, masticare chewing-gum assumere bevande colorate** alcoliche ed analcoliche almeno **un ora prima** dell'inizio del prelievo;



2. Espellere una piccola quantità di saliva nell'imbuto. Picchiettare delicatamente la base della provetta su una superficie piana per consentire alla saliva di avanzare all'interno della provetta. **Accertarsi che il livello della saliva liquida (non delle bolle) sia situato tra i numeri 1 e 2 ml;**



3. Tenere la provetta verticalmente con una mano. Chiudere il coperchio dell'imbuto con l'altra mano come mostrato, premendo il coperchio con decisione fino a sentire chiaramente uno scatto. Il liquido presente nel coperchio verrà rilasciato nella provetta, mescolandosi con la saliva. Assicurarsi che il coperchio sia chiuso ermeticamente;



4. Tenere la provetta verticalmente. Svitare l'imbuto dalla provetta. Chiudere ermeticamente la provetta utilizzando il tappo a vite presente nella confezione. **Agitare la provetta chiusa per 5 secondi;**



5. Riporre la provetta nella busta di plastica arancione contenente il materiale assorbente e chiudere la busta. Riporre la busta di plastica nella scatola del kit. **NON rimuovere il materiale assorbente (pezzo di carta bianco nella busta arancione) dalla busta.** Compilare il modulo allegato al kit;



6. Riporre la **bustina arancione** con il campione di saliva appena prelevato **nella busta pre-indirizzata insieme al modulo** e chiuderla.

7. Spedisci i campioni col tuo corriere di fiducia o in alternativa potrai utilizzare il nostro al prezzo scontato di 14,99€ con **spedizione assicurata e garantita** in 5 giorni.

**Contattateci** tramite mail [info@dnaexpress.it](mailto:info@dnaexpress.it) o telefono **per attivare il ritiro** col nostro corriere.

**ATTENZIONE: Se il liquido di stabilizzazione viene a contatto con occhi o pelle, risciacquare con acqua. Non ingerire. Conservare i campioni a 15°/30° e spedirli al massimo nelle 72h successive al prelievo per non deteriorare il DNA e quindi compromettere il risultato delle analisi.**

*Per ulteriori informazioni consulta la sezione "FAQ" sul nostro sito, dove potrai trovare video e foto della fase di prelievo.*